

Natural

Dermal Template

Libera la ferita dalla fase infiammatoria!

Endoform[®] Natural
accelera l'uscita dalla fase
infiammatoria delle ferite



La presenza o l'assenza di residui di Endoform[®] nel letto della ferita possono regolare la quantità di Endoform da applicare per tamponare le concentrazioni di proteasi e accelerare l'uscita dalla fase infiammatoria per la guarigione della ferita

Endoform[®] Natural è una matrice extracellulare esclusiva che contribuisce ad accelerare la guarigione sin dalla fase infiammatoria:


- Indicando il livello di proteasi della ferita per ottimizzare la riapplicazione¹
- Garantendo una modulazione ad ampio spettro delle proteasi della ferita²
- Garantendo un supporto a matrice extracellulare naturale e intatta, oltre che molecole secondarie per contribuire alla ricostruzione di nuovi tessuti³

Accelera l'uscita dalla **fase infiammatoria** per la guarigione delle ferite


Intrappolato nella fase infiammatoria

Le ferite croniche sono caratterizzate da elevati livelli di proteasi e carica microbica. Se lasciati incontrollati, elevati livelli di proteasi portano alla distruzione dei tessuti piuttosto che alla loro guarigione e le ferite rimangono intrappolate nella fase infiammatoria.

I livelli di proteasi della ferita devono essere regolati per poter passare alla fase di proliferazione e ricostruzione tissutale.

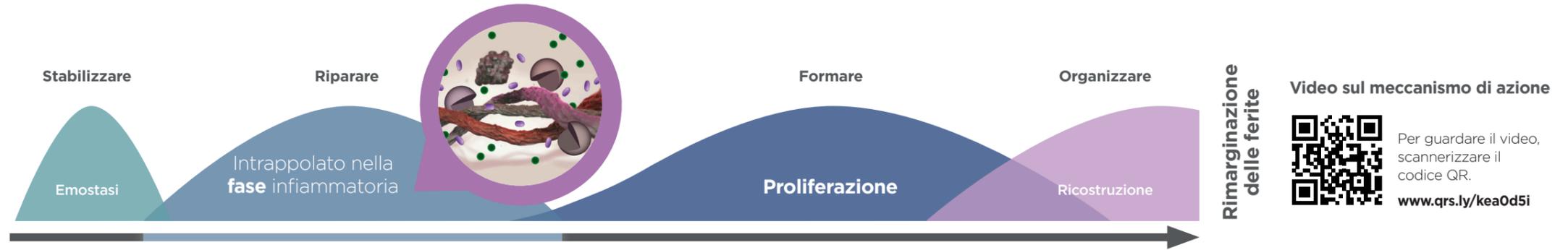

È possibile regolare la quantità di Endoform da applicare grazie ai **residui di Endoform®**

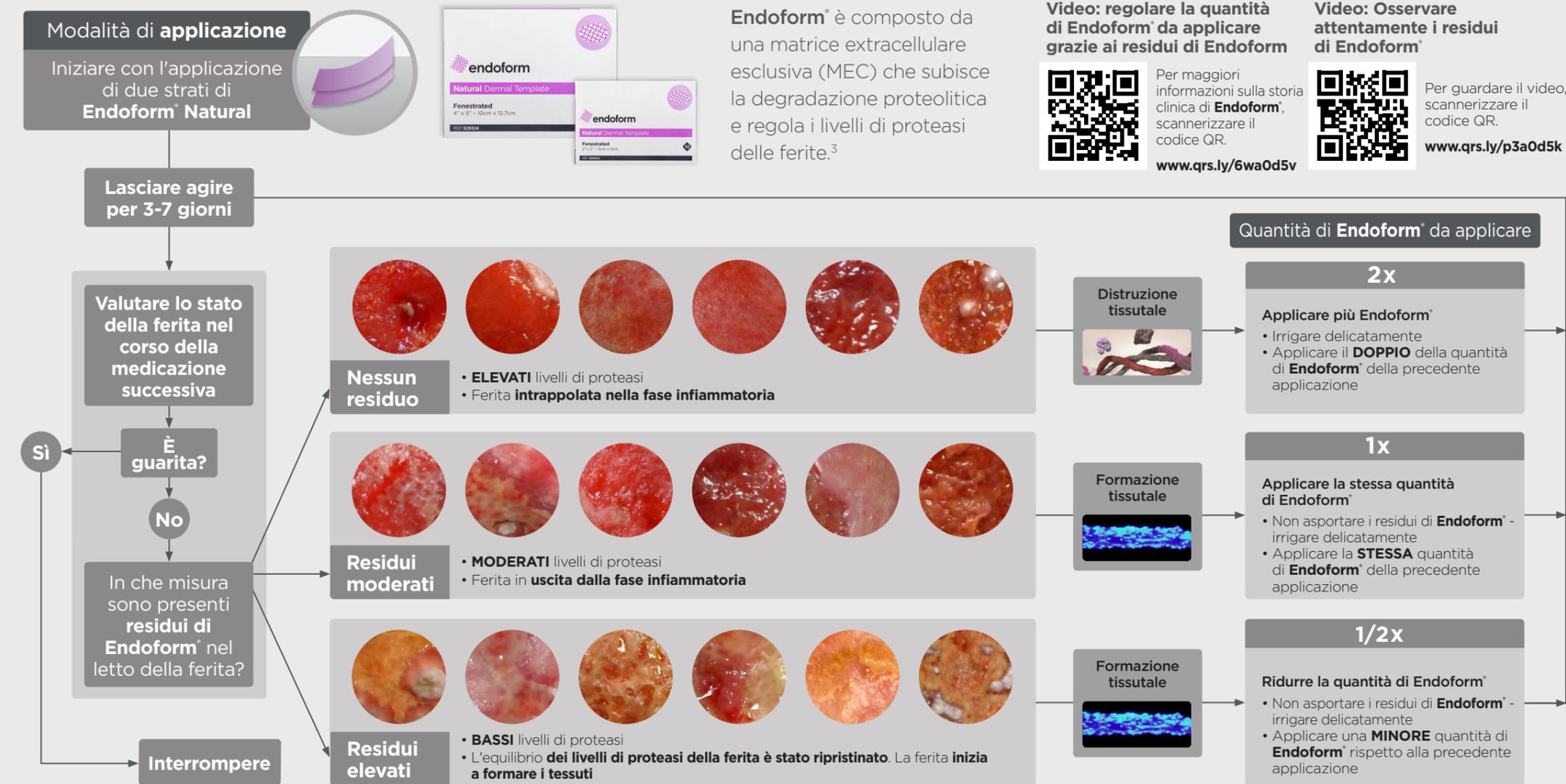

Suggerimenti

- 1 Applicare il prodotto in maggiore quantità all'inizio del trattamento per garantire che i residui di **Endoform®** siano presenti nel letto della ferita e i livelli di proteasi siano mantenuti in equilibrio.
- 2 Affinché **Endoform®** sia efficace, occorre che sia utilizzato come trattamento continuativo per diverse settimane.
- 3 Evitare l'uso di collagene ricostituito, poiché esso gelifica indipendentemente dai livelli di proteasi della ferita e non è in grado di regolare la quantità della medicazione da applicare.

Perché funziona?

L'esclusiva matrice extracellulare di **Endoform®** rimane intatta nel letto della ferita, a meno che i livelli di proteasi della ferita non siano estremamente elevati.⁴

Se i livelli di proteasi della ferita sono elevati, **Endoform®** viene digerito proprio come i tessuti appena formati. L'applicazione di più strati consente una maggiore capacità di modulazione e regolazione dei livelli della proteasi. Se i livelli di proteasi della ferita sono in equilibrio, nel letto della ferita si possono osservare i residui **Endoform®** che partecipano alla guarigione della ferita.

Accelera l'uscita dalla **fase infiammatoria** per la guarigione delle ferite

Endoform[®] Natural Dermal Template - Fenestrated


Codice	Descrizione	Quantità/scatola
529322	2x2" (5 cm x 5 cm) Fenestrated	10
529324	4x5" (10 cm x 12,7 cm) Fenestrated	10

Endoform[®] Natural Dermal Template - High Flow

Codice	Descrizione	Quantità/scatola
529302	2x2" (5 cm x 5 cm) High Flow	10
529304	4x5" (10 cm x 12,7 cm) High Flow	10

Endoform[®] Natural Dermal Template - Disc

Codice	Descrizione	Quantità/scatola
529315	1" (2,54 cm) Disc	10

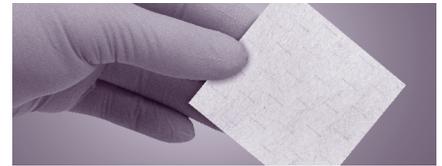

Indicazioni per l'uso:

Endoform[®] Natural Dermal Template è indicato per il trattamento delle ferite, tra cui ferite a spessore parziale e a tutto spessore, ulcere da pressione, ulcere venose, ulcere diabetiche, ulcere vascolari croniche, ferite tunnellizzate/fistolizzate, ferite chirurgiche (siti donatori, innesti, post-chirurgia di Mohs, post-chirurgia laser, deiscenza podologica e della ferita), ferite traumatiche (abrasioni, lacerazioni, ustioni di primo e secondo grado e lacerazioni cutanee) e ferite drenanti.

1. Morrisette et al (2019). Primavera, San Antonio, TX.
2. Negron, L., S. Lun e B. C. H. maggio (2014). *Int Wound J* 11(4): 392-397.
3. Lun, S., S. M. Irvine, K. D. Johnson, N. J. Fisher, E. W. Floden, L. Negron, S. G. Dempsey, R. J. McLaughlin, M. Vasudevamurthy, B. R. Ward e B. C. H. maggio (2010). *Biomaterials* 31(16): 4517-4529.
4. Champion S, Bohn G (2015). Primavera, New Orleans, LA.

Prima dell'uso, assicurarsi di leggere per intero il foglietto illustrativo fornito insieme al prodotto.

In caso di domande, si prega di contattare il proprio distributore locale. Per reclami sui prodotti o effetti indesiderati, si prega di contattare:



AROA

AROA BIOSURGERY LTD.

2 Kingsford Smith Place, Airport Oaks,
Auckland 2022, New Zealand
www.endoform.com

Endoform[®] è un
marchio registrato di
Aroa Biosurgery Limited.

MKT.1645.01_IT | July 2022