


# Endoform™

GUÍA DEL PACIENTE

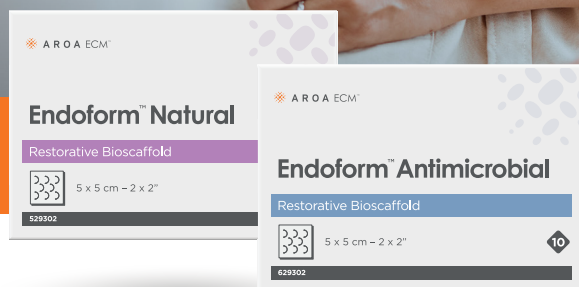

Las heridas suelen ser dolorosas, pueden ser difíciles de curar y pueden afectar nuestra calidad de vida. Su profesional de atención médica ha decidido que su herida necesita ayuda adicional para su curación.

**Endoform™** se ha diseñado para ayudar a respaldar a su cuerpo durante las diferentes fases de la curación de heridas. Un bioandamio fabricado con preestómago ovino, **Endoform** ayuda a que el tejido en el área afectada comience a estabilizarse y reconstruir un tejido más saludable para que pueda curarse.

Esta guía ha sido proporcionada por su profesional de atención médica con sus instrucciones sobre cómo cuidar su herida.

Aplice \_\_\_\_\_  
porciones de  
**Endoform**  
cada \_\_\_\_\_ días.

## Cómo aplicarlo



**Use siempre según las instrucciones de su profesional de atención médica y de acuerdo con las instrucciones de uso de Endoform.**

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con ellos de inmediato.



Enjuague y limpie el lecho de la herida según las instrucciones de su profesional de atención médica.



Retire el **Endoform** del paquete, para cortar la forma de la herida con unas tijeras limpias y colocar sobre la herida.



Hidrate el **Endoform** con solución salina o agua estéril, por hasta 60 segundos.



Aplique un vendaje secundario conforme a las instrucciones de su profesional de atención médica.

### Instrucciones clínicas:

---

---

---

---

**NOTA:** Existen indicaciones específicas, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información de seguridad para **Endoform**. Consulte con un médico o enfermera y las **Instrucciones de uso** del producto antes de la aplicación. Este documento se puede entregar a los pacientes/cuidadores a criterio de su profesional de atención médica y no pretende reemplazar las **Instrucciones de uso**. Destinado para uso solo dentro de los EE. UU.

**AROA™, Endoform™ Natural, Endoform™ Antimicrobial y AROA ECM™** son marcas comerciales de Aroa Biosurgery Limited.



### Sugerencias y consejos

- Lávese las manos antes y después de cambiar su vendaje. Use guantes cuando sea posible.
- Cuando cambie el vendaje, si observa que el **Endoform** se ha secado, agregue agua estéril o solución salina para hidratarlo.
- Mantenga la herida limpia y protéjala de cualquier objeto con el que pueda golpearse.



### Cuándo comunicarse con su profesional de atención médica

- Si la herida sangra o gotea más de lo normal.
- Si la herida se pone roja, caliente o hinchada, o si tiene mal olor.
- La herida es más dolorosa.
- Si tiene alguna otra inquietud con respecto al uso del producto o la herida.



### Instrucciones de uso

Natural

Antimicrobial



### Más información

[www.aroa.com](http://www.aroa.com)

1-877-627-6224



**AROA™**



**AROA BIOSURGERY LTD**

MKT.1887-ES.00 | © mayo de 2023